

Link do produktu: <https://sklep.pro-walk.eu/liqua-care-easy-step-wkladki-terapeutyczne-p-160.html>



LIQUA CARE / easy step - wkładki terapeutyczne

Cena	80,75 zł
Cena poprzednia	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Probody Medical APS

Opis produktu

LIQUA CARE^R

Terapeutyczne wkładki wypełnione płynnym żelem



EFEKTYWNA POMOC DLA CHORYCH I ZMĘCZONYCH NÓG

TERAPEUTYCZNY MASAŻ STÓP WRAZ Z ANATOMICZNYM ROZKŁADEM NACISKU

Wkładki Liqua Care® zawierają precyzyjnie dozowaną ilość płynnego żelu, który jest substancją całkowicie nieszkodliwą. Opatentowany system kanałów we wkładce koryguje przepływ żelu zgodnie z anatomiczną strukturą stopy (patrz rysunki poniżej), przyczyniając się do stabilniejszego rozłożenia ciężaru ciała na większą powierzchnię stopy. Wkładki Liqua Care® można zastosować do prawie wszystkich typów obuwia (buty zakryte i odkryte, pantofle, kozaki, kalosze, obuwie robocze, sandały, klapki, drewniaki, itp.) Wysoka jakość oraz trwałość materiałów użytych do produkcji wkładek, sprawiają, iż mogą być noszone zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej jak i aktywnego wypoczynku (uprawianie sportu, aerobik, bieganie). Wkładki nadają się do prania w pralce automatycznej. Liqua Care® jest wkładką antystatyczną.

Wkładki są przeznaczone dla:

- osób starszych
- kobiet w ciąży
- cukrzyków

- osób z dolegliwościami żylnymi
- osób skarżących się na bóle mięśniowe i artretyczne
- osób z opuchniętymi nogami i stopami
- wykonujących pracę na stojąco i chodząco
-

Podczas codziennego, regularnego używania wkładek Liqua Care^R odczuwalna jest zdecydowana poprawa samopoczucia przy takich dolegliwościach, jak:

- opuchnięte nogi i stopy
- zmęczone nogi i stopy
- 'zimne' stopy
- bolesność pięt
- bóle w ścięgnie Achillesa
- bóle dolnej części łydki
- bóle stawów
- bóle rwy krzyżowej
- popękane żyły (pajęczaki)

OKRES ADAPTACYJNY: 8 do 14 dni

[\(czytaj pod 'instrukcja użytkowania'\)](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Liqua care rozmiar: 35-36 , 37-38 , 39-40 , 41-42 , 43-44 , 45-46

W jaki sposób działa Liqua Care?

W jaki sposób działa Liqua Care?

Wkładki Liqua Care zawierają precyzyjnie dozowaną ilość płynnego żelu, który jest w 100% substancją nieszkodliwą. Opatentowany system kanałów we wkładce koryguje przepływ żelu zgodnie z anatomiczną strukturą stopy (patrz rys. nr1)


Na diagramie poniżej przedstawiono (patrz rys. nr2), w jaki sposób zwiększa się rozłożenie ciężaru ciała na większą powierzchnię stopy podczas noszenia wkładki Liqua Care.

Liqua Care jest wkładką przyczyniającą się do zmniejszenia dolegliwości nóg i stóp podczas długotrwałego chodzenia lub stania.

rysunek 1




rysunek 2

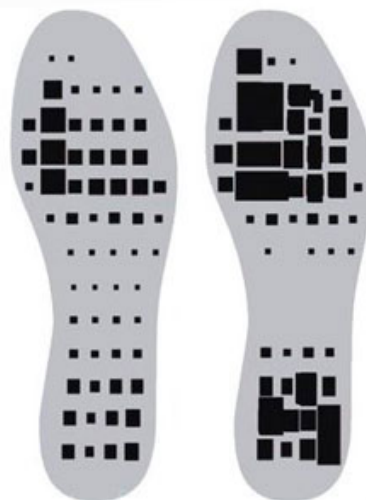

z wkładką Liqua Care®

bez wkładki Liqua Care®

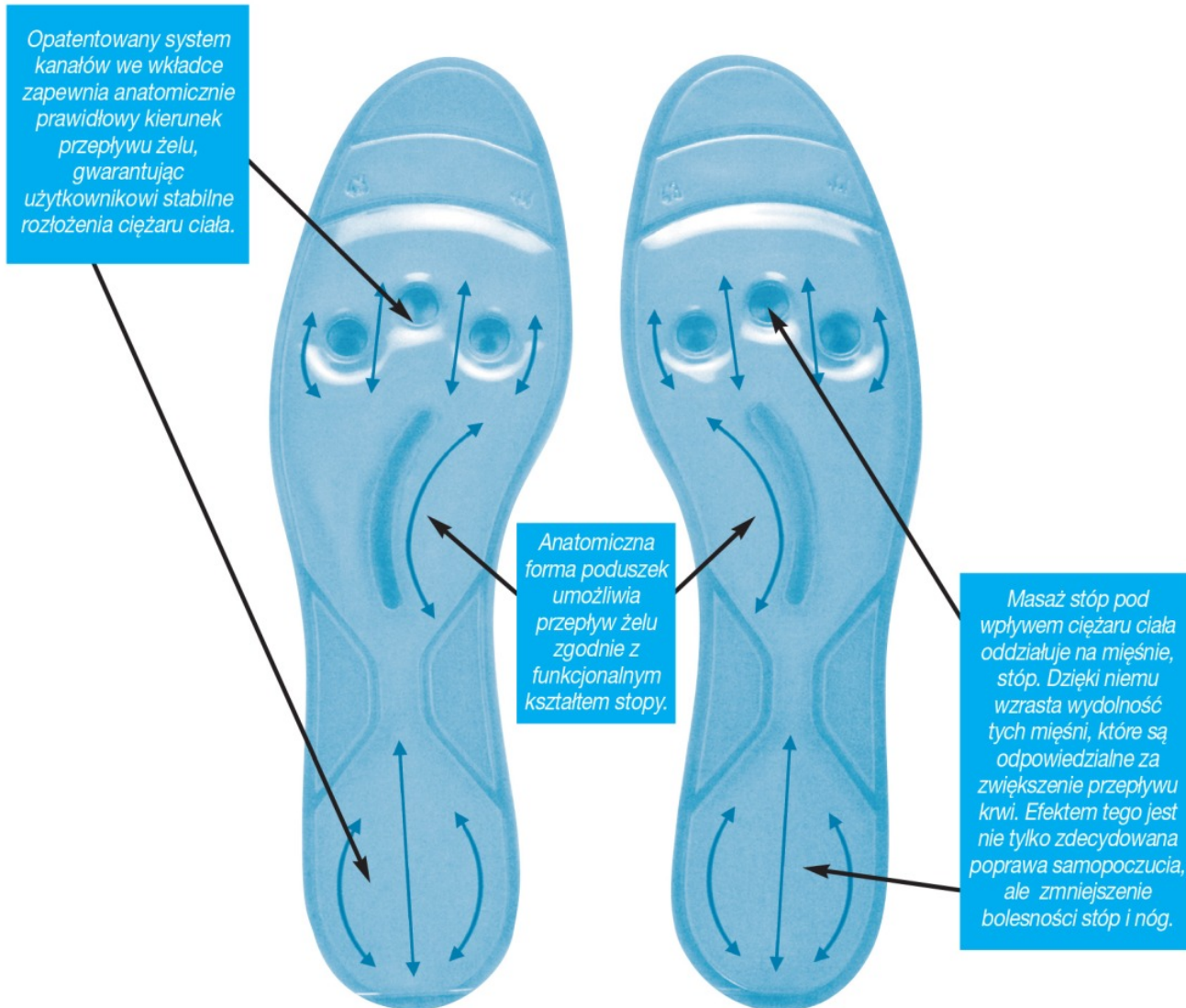

Instukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania

Wkładka powinna być ułożona w butcie w taki sposób, aby nie podlegała przemieszczaniu. Przed włożeniem wkładki but należy oczyścić z kamieni, piasku i innych ostrych przedmiotów, które mogą spowodować przedziurawienie wkładki. Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje uszkodzeń związanych z przedziurawieniem wkładki przez ostre przedmioty. Wkładkę należy włożyć do buta tak, aby powierzchnia powleczone materiałem zwrócona była do góry.

Każda wkładka Liqua Care® obejmuje dwa rozmiary. Na czubku wkładki znajdują się dwa rowki, wzdłuż których należy ją przyciąć, aby zmniejszyć jej rozmiar. Nie obcinaj poniżej dolnego rowka, ponieważ w ten sposób przedziurawisz wkładkę.

SKARPETKI I POŃCZOCHY: Rekomendowane są skarpetki i pończochy bawełniane.

BUTY ODKRYTE (sandały, klapki, itp.): Rzepey przylegające do wkładki oraz buta w okolicy pięty należy zamówić dodatkowo lub kupić w pasmanterii. W ten sposób wkładkę Liqua Care® można używać zarówno w sandałach, klapkach jak i innych butach tego typu.

OKRES ADAPTACYJNY: Dla wielu osób chodzenie lub stanie z wkładką Liqua Care® stanie się całkowicie nowym doznaniem. Dynamiczne przemieszczanie się żelu pod spodem stopy wpłynie stymulująco oraz masująco, pobudzając ośrodki czuciowe stopy. Stąd też wymagany jest okres adaptacyjny w używaniu wkładki, który wynosi od 8 do 14 dni. Pierwszego i drugiego dnia użytkowania noś wkładki Liqua Care® jedynie od 30 do 60 minut. W kolejnych dniach zwiększaj sukcesywnie czas użytkowania wkładek. W tabeli poniżej podajemy rekomendowany czas użytkowania podczas okresu adaptacyjnego:

Dzień	Czas użytkowania	Forma aktywności
1-2	0,5-1 godziny dziennie	stanie / chodzenie
3-4	1-3 godziny dziennie	stanie / chodzenie
5-6	3-5 godzin dziennie	stanie / chodzenie
7-8	5-7 godzin dziennie	stanie / chodzenie
9-10	7-10 godzin dziennie	stanie / chodzenie
11-12	10-14 godzin dziennie	stanie / chodzenie

Po upływie okresu adaptacyjnego używaj wkładek Liqua Care® na stałe.

Podczas pierwszych dni, ze względu na terapeutyczne oddziaływanie wkładki, użytkownik może odczuwać lekką bolesność stóp oraz lekkie zawroty głowy. Jednakże symptomy te są jedynie znakiem, iż wkładka daje pożądaný efekt.

Skaleczenia i rany: Liqua Care® nie jest wkładką leczącą skaleczenia lub rany! Wkładka przeznaczona jest dla osób, które nie skarżą się na tego typu dolegliwości. Jeśli Wasze stopy posiadają skaleczenia lub rany, należy zwrócić się do lekarza lub terapeuty w celu zasięgnięcia porady przed użyciem wkładek.

Ciepło: W pierwszych dniach używania wkładek możemy odczuwać wzmożone ciepło stóp, co ma bezpośredni związek ze zwiększonym przepływem krwi. Uczucie ciepła ustąpi po 8-14 dniach.

Bieganie: Wkładki Liqua Care® mogą być używane podczas biegania. Jednakże przez okres pierwszych 14 dni używaj wkładek wyłącznie do chodzenia i stania. Po upływie okresu adaptacyjnego możesz rozpocząć stopniowe używanie wkładek podczas biegania.

Liqua Care® jest wkładką antystatyczną.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PRANIE: Liqua Care® powinna być prana ręcznie bądź w pralce automatycznej, w temperaturze nie przekraczającej 40° C. Podczas prania w pralce automatycznej używaj siatki do prania.

UWAGA: Jeśli wkładka zostanie przedziurawiona należy przemyć ciepłą wodą buty oraz skarpetki, aby nie dopuścić do trwałych przebarwień. Żel znajdujący

się we wkładce Liqua Care® jest substancją nieszkodliwą i nie spowoduje **przebarwień, jeśli przemycie ciepłą wodą nastąpi bezpośrednio po przedziurawieniu wkładki.**

GWARANCJA: Udziela się 6 miesięcznej gwarancji na wkładki Liqua Care®. Gwarancja liczona jest od dnia zakupu. W przypadku uszkodzeń produkcyjnych wkładka podlega bezpłatnej wymianie. Gwarancja traci swoją ważność w przypadku przedziurawienia wkładek przez kamienie, piasek lub ostre przedmioty. W przypadku zgłoszenia reklamacji prosimy o przedstawienie dowodu zakupu.

TRWAŁOŚĆ wkładek uzależniona jest od intensywności użytkowania: 6 miesięcy+, osoby aktywne fizycznie spędzające chodząc lub biegając 8 - 12 godzin każdego dnia, 2 - 3 lata+ użytkownicy spędzające na nogach 4 - 8 godzin dziennie, ale nie aktywni sportowcy.